



Aesculap®
Endoscopic Technology

КЛИПАПЛИКАТОРЫ И КЛИПСЫ AESCULAP®


Aescular® клипаппликаторы и клипсы



Компания Б. Браун и ее направление Aescular представляет широкий ассортимент клипаппликаторов и клипсов для лапароскопической хирургии.

- Многозарядные пневматические клипаппликаторы Challenger Ti-P – размер клипсов средне-малый и средне-большой
- Многозарядные клипаппликаторы с механической подачей клипса Challenger – размер клипсов средне-малый и средне-большой
- Однозарядные клипаппликаторы – размер клипсов средний, средне-большой, большой
- Однозарядные клипаппликаторы для наложения DS клипсов – размер клипсов средний, средне-большой, большой, экстра-большой
- Зажимы для наложения клипсов типа «бульдог» – кишечные и сосудистые клипсы для временного наложения



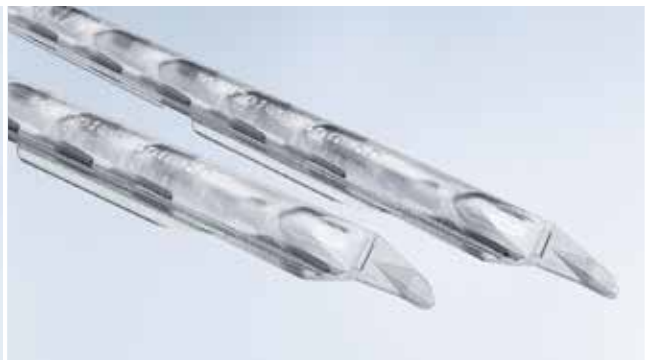

Содержание

Aesculap® Challenger® Ti-P Пневматический многозарядный клиппликатор	4
Aesculap® Challenger® Ti Многозарядный клиппликатор с механической подачей клипса	11
Aesculap® DS клипсы	14
Aesculap® временные клипсы «бульдог»	19
Aesculap® интракорпоральный ретрактор внутренних органов	24
Однозарядные клиппликаторы	25



Aesculap® Challenger® Ti-P

ИННОВАЦИЯ

Первый **пневматический** многозарядный клипаппликатор

- Инновационные технологии — пневматическая подача клипса
- Быстрое, точное и надежное позиционирование
- Прост и удобен в использовании
- Высокое качество клипсов — клипсы выполнены из чистого титана для наилучшей биосовместимости
- Отдельные функциональные рабочие элементы — многозарядный клипаппликатор и одноразовые картриджи с клипсами
- Одна система с различными рабочими вставками



средне-большой размер клипсов

средне-малый размер клипсов

- Специальный внутренний профиль клипса обеспечивает его надежное наложение на лигируемый сосуд





- Стерильная упаковка (картридж в комплекте с баллоном CO₂), цветовое кодирование последнего клипса





- Механизм закрытия клипса предусматривает возможность его репозиции и предупреждает нежелательное соскальзывание

Aesculap® Challenger® Ti-P

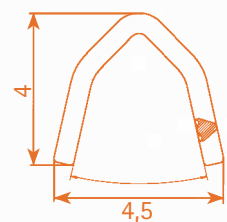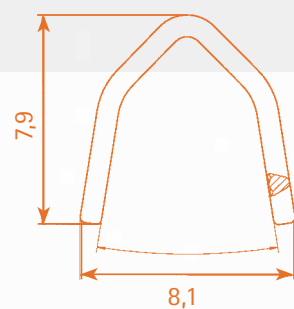Первый пневматический многозарядный клиппликатор





	ML Клиппаппликатор	
	PL606R	ø10 мм, рабочая длина 370 мм
	PL608R	ø10 мм, рабочая длина 260 мм
	PL579T	упаковка с клипсами 



упаковка из 12 стерильных картриджей по 8 клипсов (96 клипсов в комплекте с CO₂ баллоном), последний клипс с цветовым кодом;
размер клипса **средне-большой ML**

	SM Клиппаппликатор	
	PL604R	ø5 мм, рабочая длина 310 мм
	PL603R	ø5 мм, рабочая длина 205 мм
	PL574T	упаковка с клипсами 



упаковка из 12 стерильных картриджей по 12 клипсов (144 клипса в комплекте с CO₂ баллоном), последний клипс с цветовым кодом;
размер клипса **средне-малый SM**

Aesculap® Challenger® Ti-P


Первый пневматический многозарядный клиппликатор

Компоненты и запасные части

Рабочая вставка в сборе	PL536R Рабочая длина 370 мм Диаметр 10 мм	PL538R Рабочая длина 260 мм Диаметр 10 мм	PL522R Рабочая длина 310 мм Диаметр 5 мм	PL609R Рабочая длина 205 мм Диаметр 5 мм
Внутренний тубус	PL536802 Рабочая длина 370 мм	PL538802 Рабочая длина 260 мм	PL522801 Рабочая длина 310 мм	PL601801 Рабочая длина 205 мм
Внутренняя тяга	PL536801 Рабочая длина 370 мм	PL538801 Рабочая длина 260 мм	PL522800 Рабочая длина 310 мм	PL601800 Рабочая длина 205 мм
Рукоятка	PL520R	PL520R	PL520R	PL520R
CO₂ баллон Стерильная упаковка, 3 шт.	PL575SU	PL575SU	PL575SU	PL575SU
Защитное кольцо	PL520301	PL520301	PL520301	PL520301

ML

SM

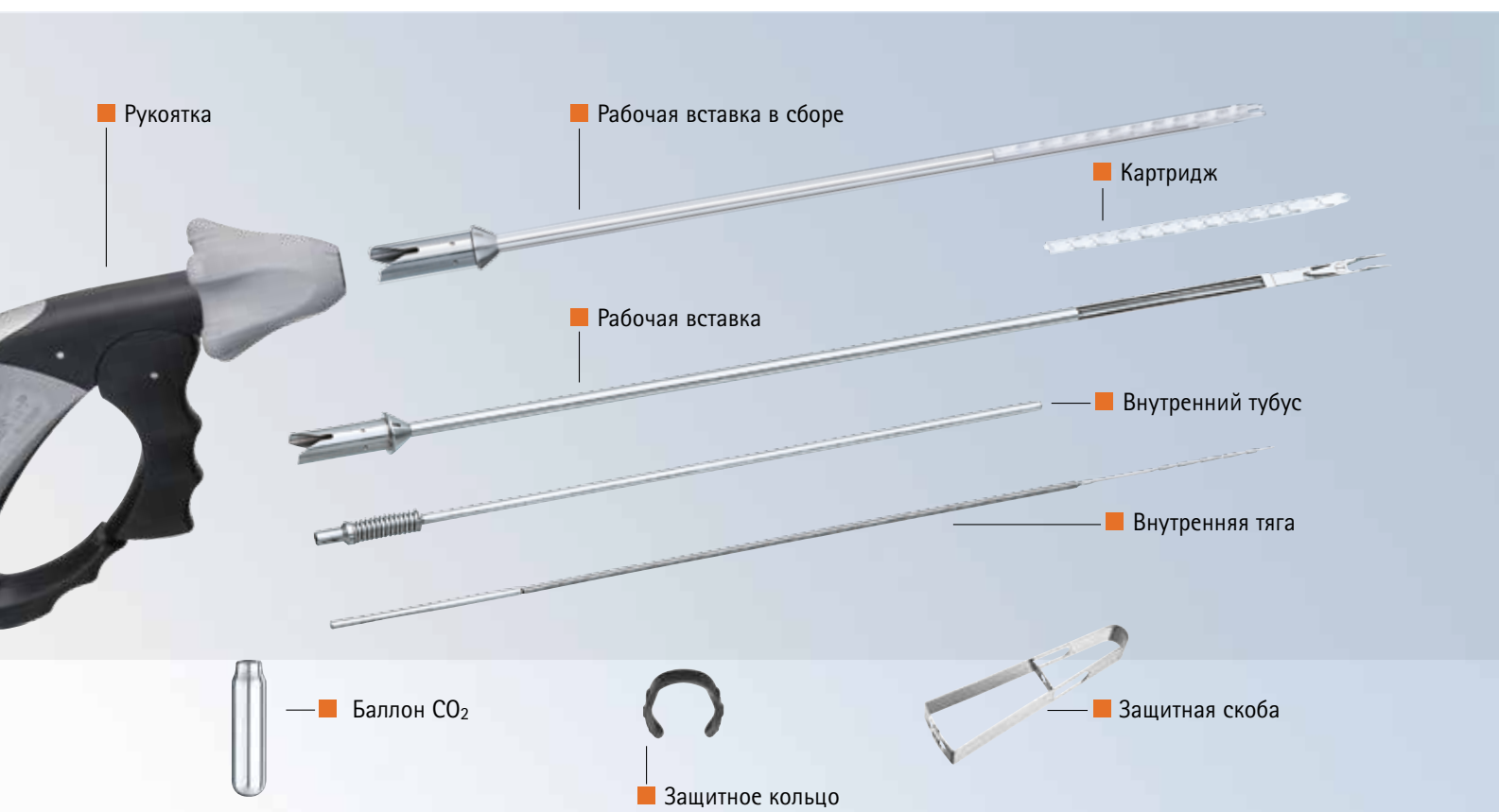

Для ухода за инструментами мы рекомендуем

Защитная скоба



PL522810

Защита браншей во время стерилизации.
Снимается, автоклавируется

Ø 5 мм

PL536810

Защита браншей во время стерилизации.
Снимается, автоклавируется


Ø 10 мм

Масло для ухода

JG600

Масло для ухода перед стерилизацией Sterilit,
в аэрозольной упаковке, флакон 300 мл, в упаковке 6 шт.

Щетки для чистки инструментов

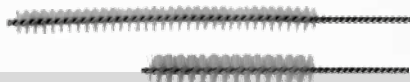

GK469R

для внутренних тубусов Ø 5 мм, длина 550 мм, в упаковке 6 шт.

PM995R

для внешних тубусов Ø 10 мм, длина 550 мм, в упаковке 6 шт.

Aesculap® Challenger® Ti-P

Первый пневматический многозарядный клиппликатор

Сборка пневматических клиппликаторов

Раз, два, три – и готово!

Шаг 1

Вставьте рабочую вставку
в рукоятку



Шаг 2

Вложите баллончик CO₂
в специальный отсек
в рукоятке



Шаг 3

Вставьте картридж
с клипсами



Challenger[®] Ti

Многозарядный клипапликатор с механической подачей клипса



Мы предлагаем клипапликаторы и клипсы 2 разных размеров




- Модульный дизайн для быстрой и надежной обработки, ухода и стерильной подготовки
- Простая разборка инструмента на части
- Простая и быстрая установка стерильного картриджа в клипапликатор
- Отдельные функциональные рабочие элементы для зарядки и закрытия клипса
- Специальный внутренний профиль клипса обеспечивает его надежное наложение на лигируемый сосуд
- Клипсы выполнены из чистого титана для наилучшей биосовместимости
- Механизм закрытия клипса предусматривает возможность его репозиции и предупреждает нежелательное соскальзывание

№ патентов

DE 44 22 621	EP 0 767 625
US 5,709,706	DE 44 29 084
DE 195 20 158	DE 296 16 632 U1
US 5,895,394	DE 199 34 634

Challenger[®] Ti

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Многозарядный клиппликатор с механической подачей клипса



	ML	Клиппликатор
PL506R	ø10 мм, рабочая длина 370 мм	
PL508R	ø10 мм, рабочая длина 260 мм	
PL569T	упаковка с клипсами	 1:1



упаковка с 12 стерильными картриджами по 8 титановых клипсов (96 клипсов в комплекте), последний клипс с цветовым кодом;
размер клипса **средне-большой ML**

	SM	Клиппликатор
PL512R	ø5 мм, рабочая длина 310 мм	
PL600R	ø5 мм, рабочая длина 205 мм	
PL572T	упаковка с клипсами	 1:1



упаковка из 12 стерильных картриджей по 12 клипсов (144 клипса в комплекте), последний клипс с цветовым кодом;
размер клипса **средне-малый SM**



Компоненты и запасные части

Рабочая вставка в сборе	PL536R Рабочая длина 370 мм Диаметр 10 мм	PL538R Рабочая длина 260 мм Диаметр 10 мм	PL522R Рабочая длина 310 мм Диаметр 5 мм	PL601R ¹ Рабочая длина 205 мм Диаметр 5 мм
Внутренний тубус	PL536802 Рабочая длина 370 мм	PL538802 Рабочая длина 260 мм	PL522801 Рабочая длина 310 мм	PL601801 Рабочая длина 205 мм
Внутренняя тяга	PL536801 Рабочая длина 370 мм	PL538801 Рабочая длина 260 мм	PL522800 Рабочая длина 310 мм	PL601800 Рабочая длина 205 мм
Рукоятка	PL510R	PL510R	PL510R	PL602R ²
Колесико поворотное	PL510300	PL510300	PL510300	PL510300
Защитное кольцо С-кольцо	PL510301	PL510301	PL510301	PL510301

ML

SM


¹ не подходит к PL510R

² не подходит PL536R, PL538R, PL522R

Aesculap® DS клипсы



DS титановые клипсы

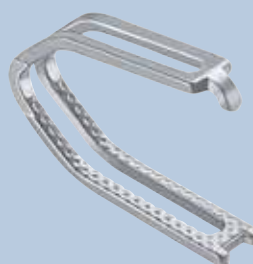

DS титановые клипсы с защелкой

DS титановые клипсы

- Клипс имеет специальную окончатую форму, что обеспечивает надежную компрессию тканей
- Оптимизированный механизм закрытия, начиная с дистального кончика, предусматривает возможность репозиции клипса и предупреждает нежелательное соскальзывание
- Специальный рисунок внутреннего профиля, увеличивающий площадь соприкосновения клипса с тканью, обеспечивает надежное наложение на лигируемый сосуд
- Клипсы изготовлены из титана
- Клиппликатор, используемый при наложении клипса, является многоразовым инструментом, что снижает затраты пользователя

Инновационно, надежно, удобно

- **Инновация:** система является уникальной в сегменте титановых лигатурных клипсов
- **Надежность:** DS-клипс обеспечивает надежное закрытие просвета сосуда
- **Удобство:** система проста в использовании и не требует специальных навыков в работе





Клипаппликаторы

- Наложение DS-клипсов можно осуществлять как с помощью лапароскопических клипаппликаторов, так и с помощью клипаппликаторов для открытой хирургии
- Клипаппликаторы обладают специальным механизмом, защищающим от сверхусилия, обеспечивая надежное и безопасное наложение клипсов
- Лапароскопические клипаппликаторы имеют специальный канал для промывания, тем самым обеспечивая обработку и дезинфекцию инструмента в соответствии со всеми требованиями безопасности
- Удобство и комфорт использования в лапароскопических условиях обусловлены наличием ротационного колесика, вращающегося на 360°
- Проверенное качество Aescular




Картриджи с клипсами

- Картриджи с клипсами поставляются стерильными и не требуют дополнительной подготовки
- Простое и удобное извлечение клипсов из картриджа исключает их выскальзывание
- Боковые пазы на картридже открываются при каждом извлечении клипса, что позволяет отследить количество оставшихся клипсов
- Цветовая кодировка картриджа позволяет легко идентифицировать необходимый размер клипсов, а специальные выступы на боковой стенке картриджа — идентифицировать клипсы с защелкой
- Картриджи имеют клеящую основу для удобства фиксации и хранения на операционном столе

Aesculap® DS клипсы




Клипаппликаторы для наложения DS-клипсов, длина 310 мм

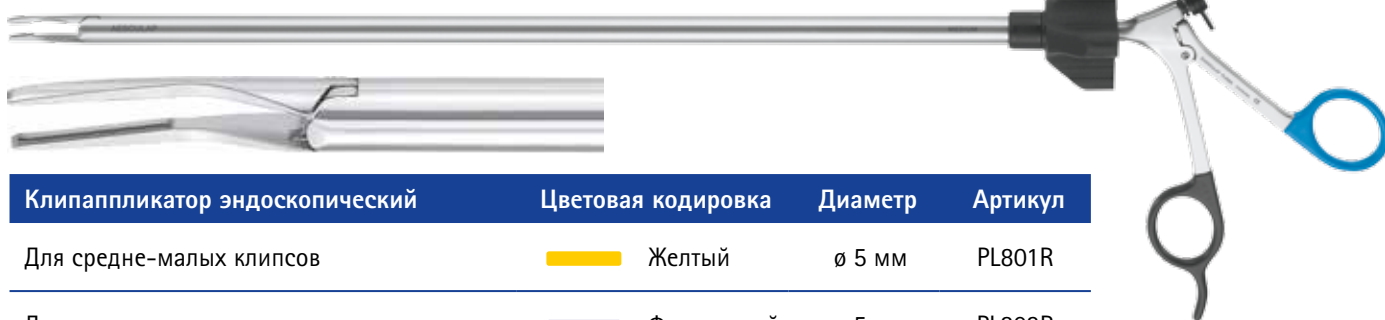

Клипаппликатор эндоскопический	Цветовая кодировка	Диаметр	Артикул
Для средне-малых клипсов	 Желтый	ø 5 мм	PL801R
Для средне-малых клипсов	 Фиолетовый	ø 5 мм	PL802R
Для средних клипсов	 Синий	ø 10 мм	PL806R
Для средне-больших клипсов	 Зеленый	ø 10 мм	PL807R
Для больших клипсов	 Оранжевый	ø 12 мм	PL808R
Для экстра-больших клипсов	 Серый	ø 12 мм	PL809R

Эндоскопический однозарядный клипаппликатор для снятия клипсов, длина 310 мм

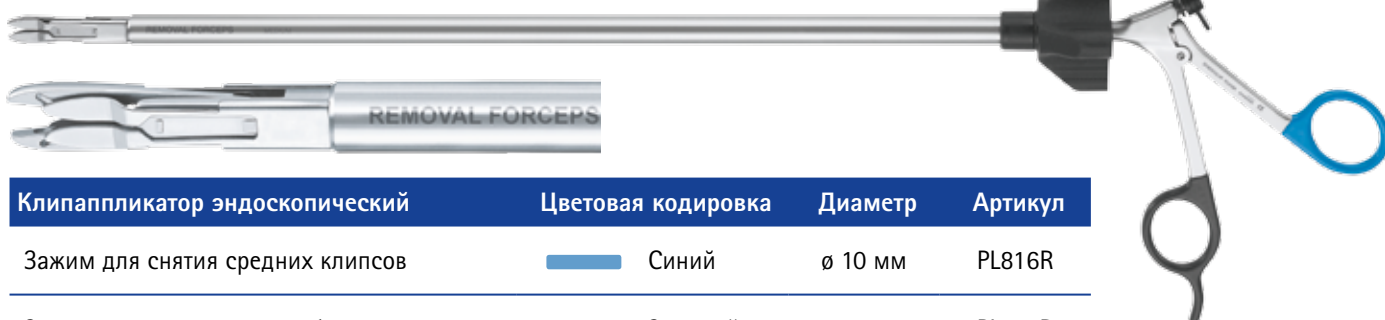


Клипаппликатор эндоскопический	Цветовая кодировка	Диаметр	Артикул
Зажим для снятия средних клипсов	 Синий	ø 10 мм	PL816R
Зажим для снятия средне-больших клипсов	 Зеленый	ø 10 мм	PL817R
Зажим для снятия больших клипсов	 Оранжевый	ø 12 мм	PL818R



Описание	Артикул		Цветовая кодировка	Упаковка
	Без защелки	С защелкой		
Клипс лигатурный титановый малый		PL450SU	 Желтый	15 картриджей по 6 клипсов (90 клипсов)
		PL452SU		6 картриджей по 24 клипса (144 клипсов)
Клипс лигатурный титановый средне-малый		PL453SU	 Фиолетовый	15 картриджей по 6 клипсов (90 клипсов)
Клипс лигатурный титановый средний		PL459SU	 Синий	15 картриджей по 6 клипсов (90 клипсов)
Клипс лигатурный титановый средне-большой		PL462SU	 Зеленый	15 картриджей по 6 клипсов (90 клипсов)
Клипс лигатурный титановый большой		PL468SU	 Оранжевый	12 картриджей по 6 клипсов (72 клипса)
Клипс лигатурный титановый экстра-большой	—		 Серый	12 картриджей по 4 клипса (48 клипсов)

Клипапplikаторы для наложения DS клипс открытым способом

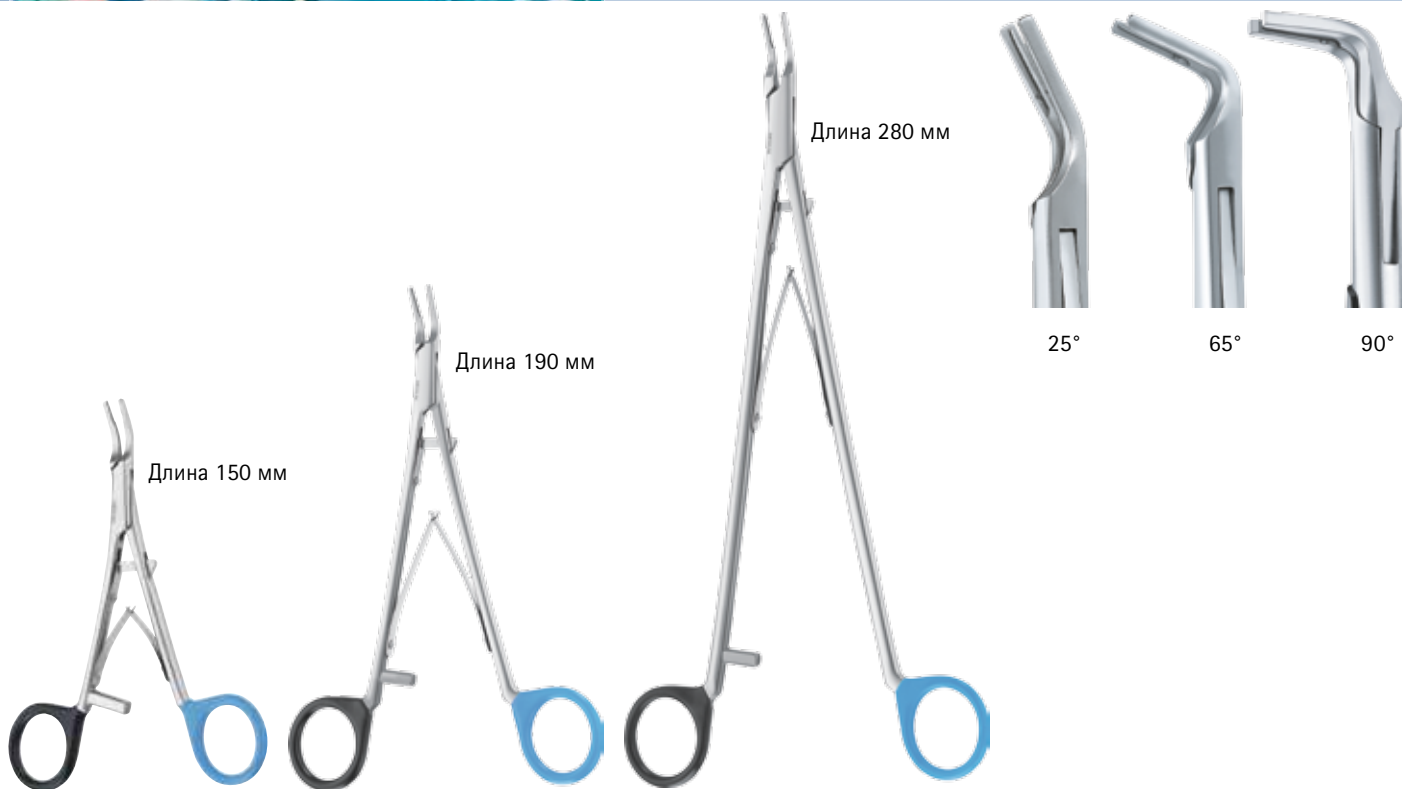

Размер	Цветовая кодировка	150 мм/25°	190 мм/25°	190 мм/65°	190 мм/90°	280 мм/25°	280 мм/65°	280 мм/90°
Малый	■ Желтый	FC171R	FC174R	FC175R		FC177R	FC178R	FC179R
Средне-малый	■ Фиолетовый	FC181R	FC184R	FC185R		FC187R	FC188R	
Средний	■ Синий	FC191R	FC194R	FC195R	FC196R	FC197R	FC198R	FC199R
Средне-большой	■ Зеленый		FC204R	FC205R	FC206R	FC207R	FC208R	FC209R
Большой	■ Оранжевый		FC214R	FC215R	FC216R	FC217R	FC218R	FC219R
Экстра-большой	■ Серый					FC230R	FC231R	

Aescular® временные клипсы «бульдог»

Клипсы типа «бульдог» используются как в лапароскопии, так и для интраоперационной окклюзии, поэтому их также называют клипсами для временного наложения.



При клипировании сосудов в лапароскопии быстрое и легкое удаление клипса имеет первостепенное значение. В частности, при частичной нефрэктомии питание почки кровью прерывается на время резекции.

Чтобы избежать повреждения почки, период ишемии должен быть как можно короче. По этой причине легкое наложение и снятие клипсов крайне важно.



Aesculap® временные клипсы «бульдог»



PL541S



PL542S



PL543S



PL544S





Преимущества клипсов «бульдог»

- При использовании клипсов «бульдог» не блокируется троакарный порт, так как после наложения клипса клип-апликатор может быть удален
- После наложения клипса сосуд или орган легко доступен для дальнейших манипуляций, что снижает травматизацию тканей
- Клипс имеет постоянную заданную величину силы закрытия, промаркированную на каждом изделии

Широкий ассортимент

- Широкий выбор из 8 сосудистых и 1 кишечного клипса
- Сосудистые клипсы представлены в 2-х вариантах: венозные (со сниженной силой закрытия) и артериальные
- Сосудистые клипсы имеют атравматическую насечку DeBakey на внутренней поверхности
- Зажимы представлены в 2-х вариантах: с возможностью прямого и углового наложения клипса



PL545S



PL546S



PL547S



PL548S



PL549S



Aesculap® временные клипсы «бульдог»



PL530R

Клиппликатор для наложения и снятия сосудистых клипсов
Наложение прямое и угловое

Ø
12,5 мм

Рабочая длина
350 мм




PL531R

Клиппликатор для наложения и снятия сосудистых клипсов
Наложение прямое

12,5 мм

350 мм

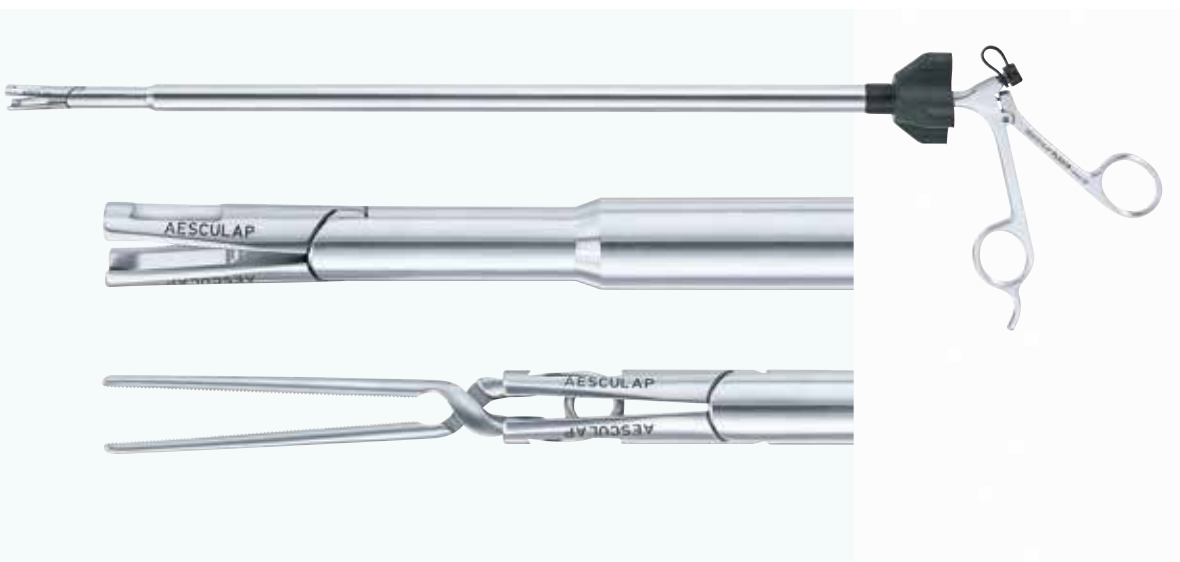



Кишечный клипс



Сила закрытия, N	Рабочая длина, мм	Форма	Цветовая кодировка
3,94	70 мм	прямые	золото

PL541S

Кишечный клипс для временного наложения на тонкую и толстую кишки. Два клипса могут быть при необходимости наложены по направлению к друг другу

Атравматические сосудистые клипсы для временного наложения с насечкой De BAKEY



Сила закрытия, N	Рабочая длина, мм	Форма	Цветовая кодировка
2,45	25	прямые	золото
2,94	45	прямые	золото
3,43	25	прямые	–
4,41	45	прямые	–

PL542S

PL543S

PL544S

PL545S

Венозные эндоскопические сосудистые клипсы с уменьшенной силой закрытия хорошо заметны благодаря золотой маркировке



Сила закрытия, N	Рабочая длина, мм	Форма	Цветовая кодировка
2,45	25	изогнутые	золото
2,94	45	изогнутые	золото
3,43	25	изогнутые	–
4,41	45	изогнутые	–

PL546S

PL547S




PL548S



PL549S

Aescular® интракорпоральный ретрактор внутренних органов



- Система для интракорпоральной ретракции, состоящая из атравматического клипса и силиконового кольца с иглой
- Атравматический клипс надежно захватывает ткани
- Крючкообразная игла закрепляется на внутренней поверхности абдоминальной стенки
- Силиконовое кольцо обеспечивает оптимальное отведение тканей и органов

		Артикул	Сила закрытия	Форма браншей
	Клипс атравматический	PL593R	5,0 N	Треугольная
	Клипс атравматический	PL594R	3,43 N	Прямая
	Силиконовое кольцо с иглой, стерильное, упаковка 12 шт.	PL595SU	—	—

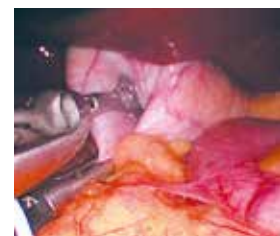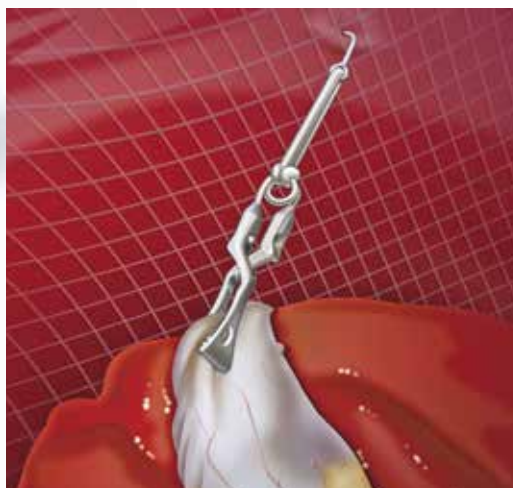

Aesculap® однозарядные клипаппликаторы



- Тонкие деликатные кончики инструмента обеспечивают оптимальный обзор
- Широкий выбор инструментов и клипсов для различных показаний
- Цветовая кодировка для простого подбора соответствующего клипаппликатора и картриджа с клипсами

- Поворотные на 360° для удобного и простого наложения клипса
- Снабжены каналом для промывания
- Механизм закрытия клипса предусматривает возможность его репозиции и предупреждает нежелательное соскальзывание



Aescular® однозарядные клипаппликаторы



Средние

Средне-большие

Большие

**Лапароскопические
однозарядные
клипаппликаторы,
длина 330 мм**

PL504R

Клипаппликатор однозарядный
эндоскопический для средних
клипсов, \varnothing 10 мм

PL503R


Клипаппликатор однозарядный
эндоскопический для сред-
не-больших клипсов, \varnothing 10 мм

PL528R

Клипаппликатор однозарядный
эндоскопический для больших
клипсов, \varnothing 12 мм



- Механизм закрытия клипса предусматривает возможность его репозиции

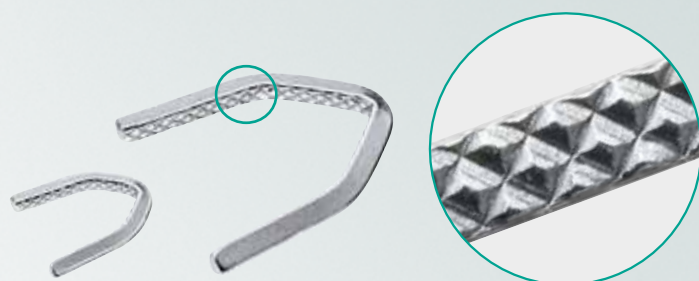


- Структура внутренней поверхности предупреждает его нежелательное соскальзывание

Средние

Средне-большие

Большие

Титановые
лигатурные
клипсы

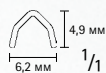

PL567T
Клипс средний
(голубой картридж).
Упаковка из 30 картриджей
по 6 клипсов (180 клипсов)



PL568T
Клипс средне-большой
(зеленый картридж).
Упаковка из 20 картриджей
по 6 клипсов (120 клипсов)



PL561T
Клипс большой
(оранжевый картридж).
Упаковка из 20 картриджей
по 6 клипсов (120 клипсов)

B | BRAUN

SHARING EXPERTISE

ООО «Б. Браун Медикал» | www.bbraun.ru

196128, Санкт-Петербург, а/я 34, e-mail: office.spb.ru@bbraun.com
Тел./факс: (812) 320 4041

117246, Москва, Научный проезд, д. 17, тел.: (495) 777 1272, факс: (495) 745 7232

 www.vk.com/bbraunrussia  www.fb.com/bbraunrussia

Архангельск	(8182) 204 096	Мурманск	(921) 708 5733	Челябинск	(922) 702 5783
Барнаул	(929) 397 2273	Н. Новгород	(831) 281 8299	Ярославль	(910) 820 9755
Владивосток	(924) 230 6630	Новосибирск	(383) 319 1396		
Волгоград	(937) 694 1887	Омск	(3812) 927 997		
Воронеж	(473) 252 8015	Пенза	(927) 375 2472		
Екатеринбург	(343) 286 1654	Пермь	(922) 309 0219, 330 5322		
Иркутск	(3952) 79 8513	Ростов-на-Дону	(928) 112 4966		
Казань	(843) 200 0463	Самара	(927) 686 4696		
Калининград	(921) 710 6557	Смоленск	(920) 326 3307		
Киров	(922) 668 7664	Тюмень	(922) 480 3565		
Краснодар	(861) 259 7594, 259 6104	Уфа	(937) 332 0062		

BMR-C-700106



22.04.2016